

Használati útmutató – kérjük, olvassa el figyelmesen!

A szemcsepp a **szemszárazság tüneteinek enyhítésére** és a szemfelszín **regenerálására** szolgáló készítmény.

ÖSSZETÉTEL

Nátrium-klorid, nátrium-dihidrogén-foszfát-dihidrát, vízmentes dinátrium-foszfát, nátrium-hialuronát 0,15%, dexpanthenol 2%, tisztított víz.

TARTÓSÍTÓSZER-MENTES

ALKALMAZÁS CÉLJA

A **Vizol S INTENSIVE szemcsepp** az enyhe és mérsékelt szemszárazság tüneteinek kezelésére, a könnyfilm stabilizálására, a szem síkosítására és a szemfelszín simaságának helyreállítására szolgáló készítmény.

Hatásosan alkalmazható a következő esetekben is:

- a szemfelszín mechanikus eredetű (kontaktlencse-viselés, diagnosztikai vagy sebészeti beavatkozás okozta) irritációja
- külső tényezők okozta mechanikus irritáció (szél, nap, klóros víz, gyógyszeresedés),
- a szem megerőltetése (hosszas számítógép-használat esetén).

A szemcsepp alkalmazásával gyorsabban enyhíthetők a fenti állapotokat kísérő kellemetlen tünetek.

A **Vizol S INTENSIVE szemcsepp** hatása kettős: nátrium-hialuronát összetevője **nedvesíti** és stabilizálja a könnyfilmet, míg a dexpanthenol nyugtatja és védi a szemfelszínt, **elősegítve** annak **regenerálódását**. A szemszárazságot csökkenthető, és ezáltal a szövődmények megelőzhetőek.

Szemszárazságot okozhatnak a következő tényezők:

- szemsebészeti beavatkozások, a szem sérülése vagy idegen test jelenléte a szemben
- a könnyfilm könnyhiány vagy a könny túlzott párolgása által kiváltott károsodása, amely a szemfelszín sérülését és kellemetlen érzést okozhat
- környezeti tényezők (központi fűtés, légkondicionálás, fénycsőes világítás, füst és szél)
- hosszas számítógép-használat
- dekongesztáns szemcseppek alkalmazása
- öregedés
- kontaktlencse-viselés
- nem (a nőt érintő hormonális változások: terhesség, szoptatás, menstruáció vagy menopauza)
- gyógyszerhasználat (antidepresszánsok, vérnyomáscsökkentők, fogamzásgátlók)
- bizonyos betegségek (rheumatoid arthritis, diabétesz, asztma, pajzsmirigy-rendellenességek, glaukóma)

A **Vizol S INTENSIVE szemcseppet kontaktlencse-viselők is alkalmazhatják.**

FIGYELMEZTETÉSEK

Ne alkalmazza a Vizol S INTENSIVE szemcseppet:

- a nátrium-hialuronáttal vagy a Vizol S INTENSIVE szemcsepp bármely más összetevőjével szembeni túlérzékenység (allergia) esetén.
- Ha allergiás reakciót észlel, azonnal hagyja abba a készítmény használatát és forduljon orvoshoz!

Egyéb megjegyzések:

- Ne használja a készítményt, ha észreveszi, hogy a szemcsepp flakonja vagy applikátora sérült.
- A biztonságos alkalmazás és higiénia érdekében a flakont csak egyetlen személy használja!
- A **Vizol S INTENSIVE szemcsepp** és kontaktlencse-folyadékok, más szemcseppek vagy helyileg alkalmazott szemkenőcsök között kölcsönhatás nem ismert. Ha más szemkészítményt is alkalmaz, legalább 15 percet várjon a két adagolás között.

Megjegyzés:

Közvetlenül a szemcsepp alkalmazása után látáscsökkenés fordulhat elő. Tartózkodjon a járművezetéstől vagy gépek működtetésétől mindaddig, amíg látása visszanyeri élességét.

A KÉSZÍTMÉNY BIZTONSÁGOSSÁGA


A cseppentő technológia tartalmaz egy szűrőt, amely megakadályozza az oldat szennyeződését a felbontást követően, ezáltal biztonságossá teszi a készítmény alkalmazását. A készítmény tartósítószeret nem tartalmaz, így csökken az irritáció és a szemfelszín károsodásának esélye. A készítményt általában jól tolerálják a betegek. Ha mégis mellékhatást tapasztalna, forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez!

ADAGOLÁS


A készítmény szükség szerint naponta többször alkalmazható.

Cseppentsen 1-2 cseppet a szembe, majd többször pislantson, ezáltal biztosítva az oldat egyenletes eloszlását a szem felületén.


A készítmény tartósítószeret nem tartalmaz, ezért alkalmazása nem károsítja a szemet.

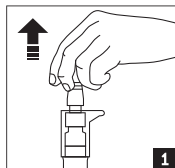


1. Távolítsa el a kupakot a pumpáról.

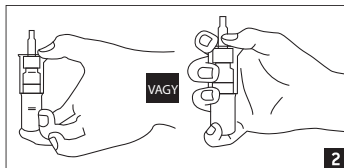

2. A 2. ábrán látható kétféle fogás közül az egyiket választva fogja kezébe a pumpát.

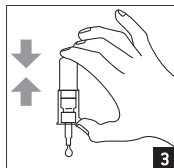

3. Fordítsa fejjel lefelé a tartályt, és **nyomással** aktiválja a pumpát, míg meg nem jelenik az első csepp.

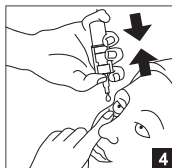

4. Tartsa fejjel lefelé a tartályt, majd a pumpát megnyomva cseppentse az előírt számú cseppet a szembe.

PRÓBÁLJA KI A VIZOL S TERMÉKCSALÁD EGYÉB SZEMCSEPPJEIT:

KÉSZÍTMÉNY	JAVALLAT	ÖSSZETÉTEL	AZ ÁLLAPOT KIVÁLTÓ OKAI	ALKALMAZÁS	KONTAKTLENCSÉ MELLETT ALKALMAZHATÓ	ALKALMAZÁS UTÁNI ÉRZÉS
Vizol S 0,21 FAST RELIEF	Enyhe szemszárazság kezelésére	Nátrium-hialuronát 0,21%	Hosszas számítógép-használat, autóvezetés és utazás okozta szemfáradtság, kontaktlencse-viselés, allergia, idegen test, környezeti tényezők (száraz levegő, füst)		Igen	Azonnali enyhülés és felfrissülés. Hosszan tartó nedvesség-érzet.
Vizol S 0,4 LONG EFFECT	Súlyos szemszárazság kezelésére	Nátrium-hialuronát 0,4%	Agresszív környezeti tényezők (szél, nap, száraz levegő), központi fűtés és légkondicionálás, öregedés, gyógyszeres kezelés	1-2 csepp a szembe, szükség szerint naponta többször	Nem	Azonnali enyhülés és tartós nedvesítés. Hosszan tartó komfort- és síkosság-érzet. Az alkalmazás a látás pillanatnyi elhomályosulását okozhatja.
Vizol S INTENSIVE	A szemszárazság enyhítésére és a szemfelszín regenerálására	Nátrium-hialuronát 0,15% Dexpantenol 2%	Mechanikus eredetű szem-irritáció: kontaktlencse-viselés, sebészeti vagy diagnosztikai beavatkozás, gyógyszereszedés		Igen	Azonnali felfrissülés és hosszán tartó komfort-és nedvesség-érzet.

GYÁRTÓ



JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d. d. Svilno 20,
51000 Rijeka, Horvátország

LEJÁRATI IDŐ

A csomagoláson feltüntetve.
Felnyitás után 180 napig használható fel.
Ne alkalmazza a készítményt a lejáratí időn túl!

TÁROLÁS

Legfeljebb 25°C hőmérsékleten az eredeti csomagolásban.

Gyermekek elől elzárva tartandó!

CSOMAGOLÁS
10 ml



FELÜLVIZSGÁLAT IDŐPONTJA
2021. április

A CSOMAGOLÁSON FELTÜNTETETT SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA



Olvassa el a használatí útmutatót!



Gyártó



Lejáratí idő



Gyártási szám



Steril, aszeptikus gyártási technológiával készült



CE jelölés



Figyelem! Olvassa el a használatí útmutató „Figyelmeztetések” fejezetét!

Vizol S INTENSIVE



Regenerálás és nedvesítés mechanikus eredetű és gyógyszer okozta irritáció esetén



Kettős hatás enyhe és közép súlyos szemszárazság esetén



Kontaktlencse-viselés okozta kellemetlen érzés és irritáció enyhítése



Felnyitást követő lejáratí idő **6 hónap**

A dobozon található további szimbólumok